

WHO WE ARE

체외검사와 IT를 융합하여 펫 헬스케어의 비효율을 제거함으로써 반려동물과 보호자들이 더 행복한 사회를 만들어갑니다.

WHAT WE DO

Ahead 시약 막대에 소변을 묻혀서 핏펫 앱으로 촬영하면 10가지 항목을 검출하여 다양한 질병의 이상징후를 알려줍니다

WHY IT MATTERS

Ahead를 통해 강아지, 고양이 사망 질병의 30%를 차지하는 신장질환, 간질환, 당뇨병 등을 사전에 예방할 수 있습니다.

Ahead 구성

Ahead 스타터

비색표, 일회용 시약 막대와 함께 소변을 받는데 필요한 멸균 컵, 멸균 살레, 파이펫, 일회용 장갑이 포함됩니다. Ahead를 처음 사용하시는 분들에게 추천드립니다. * 비색표와 일회용 시약 막대만 별도 구매도 가능합니다.

Ahead 캐리터

고양이가 Ahead 캐리터 위에 소변을 볼 경우 일반 모래와 다르게 흡수되지 않으며, 이때 파이펫을 이용해 소변을 빨아들여 시약 막대에 묻히시면 됩니다.

주의사항

Ahead는 간이 검사법으로, 확진 검사법은 아닙니다. 이상징후가 발견될 경우 동물병원에 방문해 수의사의 진단을 받으시기 바랍니다.

홈페이지 및 SNS

홈페이지 www.fitpet.co.kr
페이스북 www.facebook.com/fitpetofficial
인스타그램 instagram.com/fitpet_official

Contact

서울특별시 강남구 선릉로 551 2층
TEL: 02-6339-1800 / contact@fitpet.co.kr



핏펫 앱은 무료로 제공됩니다.
앱스토어와 구글플레이에서 '핏펫'을 검색해주세요.



소중한 우리 아이 더 아프기 전에

Ahead

터치 한 번으로 사랑하는 반려동물의 건강을 확인하세요



OVERVIEW

Ahead는 체외검사와 IT를 융합하여 반려동물의 건강을 고통 없이 간편하게 확인할 수 있게 합니다.



수술로 반려동물은 큰 고통을, 보호자는 경제적 부담을 갖게 됩니다.

언어적 의사표현 불가	시간적, 비용적 제약	질병 예방 방안 부재
건강 적신호에 대한 자가 감지 및 표현 불가	병원에 자주 방문하기 위한 한계 존재	동물병원 방문 없이 질병 감지 수단 부재




사전에 예방이 가능한 질병임에도 불구하고 수술로 인한 고통을 초래하며, 병원 방문과 수술 등으로 인한 시간적, 비용적 비효율이 발생합니다.

PRODUCT

Ahead를 통해 반려동물의 건강상태를 단시간에 파악할 수 있습니다.

Step 1 Ahead 시약 막대에 소변을 묻힌 후 스마트폰 앱으로 스캔합니다.

포도당
백혈구
빌리루빈
비중
잠혈

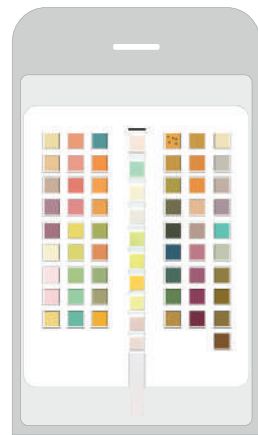

10가지 검출 항목

단백질
아질산염
우로빌리노겐
케톤
pH

Step 2 촬영 후 60초 내외에 9가지 이상 질병의 이상징후를 보여줍니다.

당뇨병	요로감염증	요로결석
신장질환	단백뇨	간질환
케톤산증	빈혈	세균감염

감지 가능한 다양한 질병

GUIDE

소변보는 자세에 따라 적합한 소변 채취 방법을 선택해주세요.

멸균 살레에 받아주세요	멸균 컵에 받아주세요	배변 패드를 뒤집어 받아주세요
어헤드 캐리터에 소변을 받아주세요	모래통에 비닐랩을 깔아주세요	펠릿 거름망 아래에 배변 패드를 뒤집어 주세요

촬영 환경에 유의해주세요.

Ahead 사용 시 가능한 밝은 곳에서 그림자가 지지않게 촬영해 주시길 바랍니다. 키트에 그림자가 지거나 혹은 키트와의 촬영 간격이 너무 가깝거나 먼 경우, 앱 내에서 실시간으로 안내 문구를 통해 올바른 촬영 환경을 제시해드립니다.

Ahead 권장 사용주기는 1~2달에 한 번입니다.

자주 아픈 우리 아이의 건강을 더 자주 확인해보고 싶을 때, 밝은 모습만 보여주는 아이가 혹시 아픈건 아닐까 걱정될 때, 건강해서 병원갈 일이 없는 아이를 위해 혹시 몰라 검사해보고 싶을 때 등 우리가 사랑하는 아이들을 위해 한두 달에 한 번씩 사용해주세요.